

MERE END ET FLOT SMIL

DENTALIMPLANTATER OG LIVSKVALITET

Genskaber selvtillid



 **straumann**

PLEJE EFTER INDGREBET


Det er vigtigt, at du passer omhyggeligt på dig selv, når du har fået trukket en tand ud eller fået foretaget tandkirurgi i det hele taget. Hvis du følger disse anvisninger, vil det hjælpe med at minimere smerter, hævelse, ømhed efter indgrebet og fremme helingen samt forebygge infektion.

BLØDNING

Det er normalt, at det bløder fra tandalveolen ("tandhullet") den første dag. Det kan se langt mere dramatisk ud, end det egentlig er, da spyt får det til at se ud som om der er meget mere blod end der i virkeligheden er. Det er vigtigt, at du ikke skyller munden, hvis du bløder, men i stedet udøver tryk på tandalveolen ved at bide ned i et sammenfoldet, rent stykke vat i mindst 15 minutter. Hvis blødningen fortsætter i mere end en time, skal du kontakte tandlægen.

SMERTELINDRING

Det er normalt at føle et vist ubehag efter en ekstraktion ("tandudtrækning"), men simpel smertelindring bør være nok til at håndtere dette. Undgå aspirin, da det hæmmer koagulationsprocessen. Følg altid producentens anvisninger. Hvis du er i tvivl, bedes du spørge tandlægen først. Hvis du har smerter i flere dage, bedes du kontakte tandlægen.

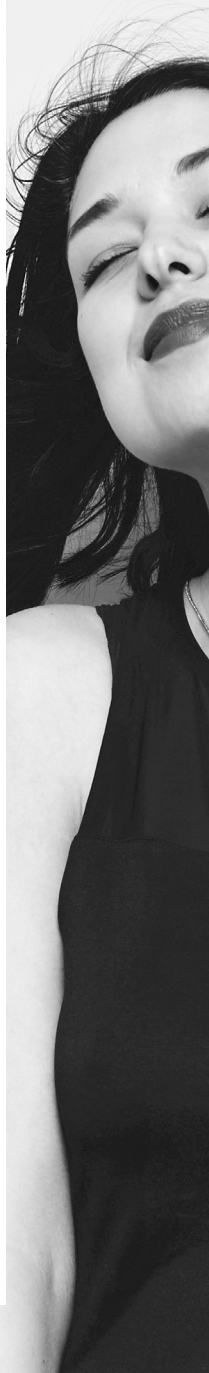



HVILE

Hvil så meget som muligt resten af dagen efter indgrebet. Hold hovedet oppe for at forebygge blødning og hold hovedet højere den første nat ved hjælp af en ekstra pude, hvis det er muligt.

MAD OG DRIKKE

Undgå varme fødevarer og drikke, indtil bedøvelsen forsvinder, da du ikke kan føle smerte ordentligt i denne periode og kan brænde eller skolde munden. Prøv at undgå at tygge maden i den side, hvor tanden er trukket ud, så udtrækningsstedet kan hele korrekt.

TANDBØRSTNING

Fortsæt med din almindelige tandbørstningsrutine, og pas på området omkring det sted, hvor tanden blev trukket ud.

MUNDSKYLNING

Lad dig ikke friste til at skylle munden i de første 24 timer – på den måde giver du tandalveolen tid til at hele. Derefter kan du skylle munden med saltvand, som vil hjælpe med helingen.

ALKOHOL


Undgå alkohol i mindst 24 timer efter en ekstraktion, da dette kan fremme blødning og forsinke helingsprocessen.

RYGNING

Hvis du ryger, skal du undgå at ryge resten af dagen som minimum, men helst et helt døgn.

JEG HAR MISTET EN TAND. HVAD GØR JEG NU?

Der er mange faktorer, der kan medvirke til, at man mister en tand. Det kan være et traume (en ulykke), huller i tænderne, vaner, kost, parodontale sygdomme, medfødt (født uden tanden) eller manglende mundhygiejne. Men det er en realitet, at tanden, uanset hvad årsagen er, skal udskiftes af både æstetiske og funktionelle årsager. I sunde tænder overfører roden tyggekraften til kæbeknoglerne. Tænderne forbliver stabile, og der er ingen store ændringer. Men når vi mister en tand, begynder der, ud over at de tilstødende tænders stabilitet kompromitteres, også en knogletabsproces, som kaldes resorption.

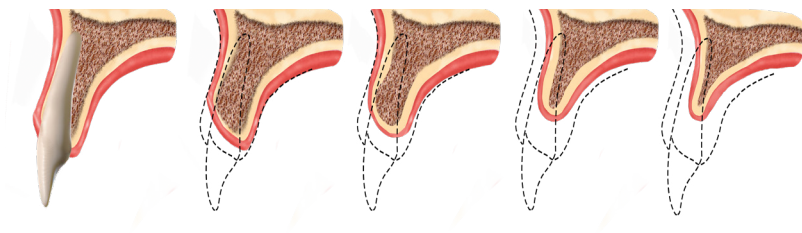

KNOGLEÆNDRINGER GRUNDET EN MANGLENDE TAND

Tænderne modtager naturligt tyggekraften, og når den ikke er til stede, stimuleres knoglen ikke længere, hvilket medfører, at den reduceres i højde og længde. I første omgang virker det måske ikke så alvorligt at lade tandens plads stå tom, men efterhånden som tiden går, kan der ske store ændringer.



MULIGE ÆNDRINGER SOM FØLGE AF TAB AF TÆNDER.

- 1 Æstetiske ændringer forårsaget af ændringen af ansigtets konturer på grund af manglende støtte.
- 2 Optagelse af pladsen efter den manglende tand af de tilstødende og modsatsiddende tænder, som forskydes for at udfylde den tomme plads.
- 3 Hvis den manglende tand er fra den forreste del af munden, påvirker det smilet og muligvis også selvtilliden.
- 4

Problemer med at tale og tygge og som følge heraf mulige fordøjelses og sundhedsproblemer, som regel på grund af forkert tygning.



HVAD ER BEHANDLINGS- MULIGHEDERNE?

Der er adskillige behandlingsformer tilgængelige, der bevarer eller erstatter tænderne, afhængigt af dine kliniske omstændigheder. En eller flere af behandlingsmulighederne kan være velegnet for dig. Konsulter din tandlæge for at bestemme din behandlingsplan.

JEG HAR MISTET EN ELLER FLERE TÆNDER


De grundlæggende forskelle – Konventionel
protetik vs. implantat

BROLØSNINGEN

Med konventionelle metoder, skal de to sunde nabotænder slibes ned for at kunne fikse en bro. Dette resulterer i tab af naturlig tandsubstans. Desuden overfører broen ikke tyggekræfterne til kæbeknoglen, så der kan også forekomme knogleforringelse.

IMPLANTATLØSNINGEN

Tandimplantatet erstatter den oprindelige tands rod, mens de sunde nabotænder forbliver intakte, uden at de skal slibes ned.

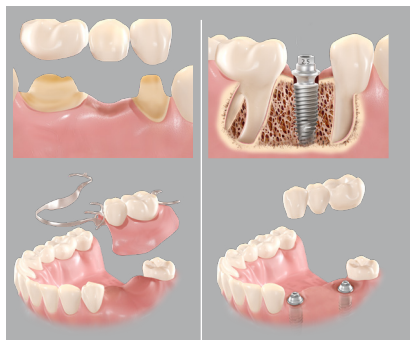

BROLØSNINGEN

IMPLANTATLØSNINGEN



JEG HAR MISTET ALLE MINE TÆNDER

FAST BRO TIL HEL OVER- ELLER UNDERMUND

En attraktiv og effektiv løsning med mange fordele. Ved hjælp af komponenter fra Straumann Group kan manglende tænder i enten over- eller under-kæben erstattes med en tandbro til hel over- eller undermund, der understøttes af fire eller flere tandimplantater. Protetikken kan kun tages ud af tandlægen. Disse implantater giver sikker og varig støtte til broen og de kunstige tænder. Afhængigt af det enkelte tilfælde, kan midlertidige kunstige broer leveres på operationsdagen eller kort tid efter.

AFTAGELIGE PROTESER

Kan nemt tages ud af hensyn til den daglige mundhygiejne. Aftagelige implantat-støttede proteser kan også have en bedre tilpasning og en højere stabilitet end de konventionelle løsninger. Implantaterne fungerer som et anker for de fastgørelseskomponenter, der er fastgjort til protesen. Selv om der findes flere forskellige fast-gørelseskoncepter og systemer, er de alle fordelagtige for patienten. Protesen kan også nemt tages ud af hensyn til den daglige mundhygiejne.



FAST PROTETIK





AFTAGELIGE PROTESER

HVAD ER ET TANDIMPLANTAT?

Tandimplantater er blevet udformet til at efterligne den naturlige tand eller de naturlige tænder, der mangler. Tandimplantatet giver en fundamentstruktur til at bære tandlignende protetik og bidrager dermed til et forbedret fysisk udseende og evnen til at bevare din tyggefunktion.

De er velegnede til patienter, der har mistet en, flere eller alle deres tænder. Nedenfor kan du se strukturen af en naturlig tand sammenlignet med protetikken på et implantat. Tandimplantater er fremstillet af titanium eller keramik. De protetiske komponenter kan være fremstillet af metalliske, polymeriske eller keramiske materialer.

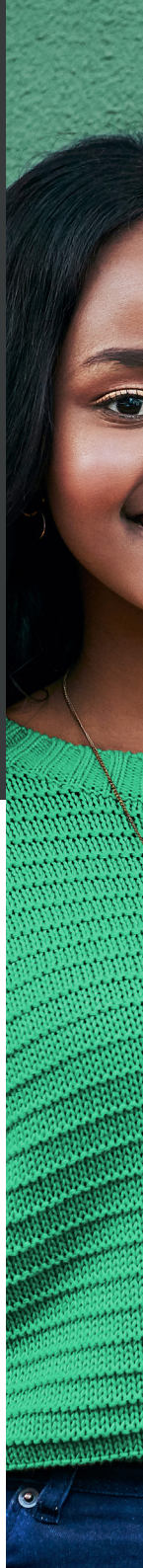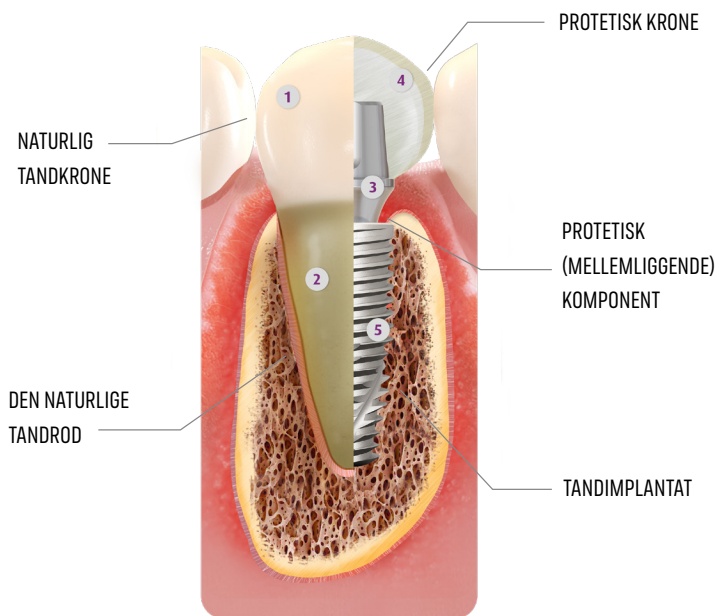



TANDIMPLANTATER BEVARER NATURLIGT **TYGGEEVNEN OG** **UDSEENDET**

En stor fordel ved protetik på implantater er, at det ikke bevæger sig rundt i munden, når man spiser eller taler. Dette tilvejebringer et mere naturligt og behageligt resultat end broer eller konventionelle proteser, hvorved dit velbefindende og din livskvalitet forbedres.

DE GRUNDLÆGGENDE BEHANDLINGSFORDELE MED IMPLANTATER



ÆSTETIK

Implantater er en løsning, som ikke blot ser naturlig ud, men som også hjælper med til at standse knogleresorptionen, som sker, når patienten mister en hel tand (krone og rod), og som kan ændre et ansigts udseende.



HOLDBARHED

Implantater er en løsning, der er udarbejdet til at holde livet ud, særligt når de kombineres med protetiske komponenter af samme mærke som implantatet (originaler).



BEVARING AF DE NATURLIGE TÆNDER

Med den konventionelle teknik skal de tænder, der sidder ved siden af den manglende tand, slibes ned for at kunne anvendes som forankringer til en bro. Men tandimplantater eliminerer generelt behovet for at manipulere med de sunde tænder.



DE SMELTER SAMMEN MED DIN KROP

Selv de bedste proteser vil altid være et fremmedlegeme, der kræver omfattende vedligeholdelse. I modsætning hertil er et tandimplantat blot en kunstig rod, som efter helingen bliver en del af din krop og fungerer som en naturlig rod.



BEVARING AF KNOGLESTRUKTUREN

Implantaterne overfører tyggekraften til kæbeknoglen og bidrager dermed til at bevare den. Hvad angår delproteser eller konventionelle broer sker der en gradvis resorption af knoglen, hvilket, som beskrevet tidligere, kan ændre dit ansigtsudtryk.



BEVARING AF TYGGEKVALITET

Tandproteser, der støttes af implantater, forbedrer tyggeeffektiviteten og forbedrer samtidig patientens ernæring.

EN ENKELT MANGLENDE TAND

Tandimplantatet erstatter
den manglende tandrod.




TO ELLER FLERE MANGLENDE TÆNDER

Implantaterne fungerer som
en støtte for broen.



FASTE BROER TIL HEL OVER- ELLER UNDERMUND

En attraktiv og effektiv løsning med mange fordele.

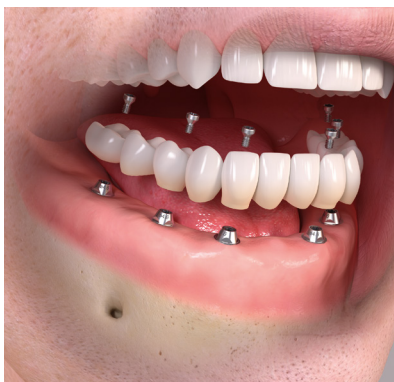

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL



Hvad er et tandimplantat?

Tandimplantater er anordninger, der er fremstillet af titanium, der erstatter tandroden og støtter protetikken. Tandimplantater bidrager til at forbedre dit fysiske udseende og din evne til at tygge og er velegnede til patienter, der har mistet en, flere eller alle deres tænder. Når disse anordninger er forankrede i en sund knogle, giver de pålidelig stabilitet til patientens nye tænder.

Hvis der skal udskiftes mange tænder, skal separate implantater så anvendes til hver enkelt tand?

Ikke nødvendigvis. Din tandlæge vil vurdere antallet af tænder, der skal udskiftes, og størrelsen af protetikken. Tandlægen vil også beregne hvor mange implantater, der skal bruges. Hvert enkelt tilfælde skal undersøges og planlægges udførligt.

Kan jeg bruge protetikken umiddelbart efter indgrebet?

Den teknik, der anvendes til at placere protetik umiddelbart efter indgrebet eller kun få dage senere, kaldes immediat indsættelse. Den protetik, der anvendes ved immediat indsættelse, er normalt provisorisk og skal udskiftes efter nogen tid. Det er kun muligt at anvende immediat indsættelse, når tandlægens diagnose indikerer fin indledende stabilitet af implantaterne, der er fikseret til knoglen. Dette er ikke altid tilfældet.

Er det muligt at vide før indgrebet, om implantatets placering muliggør immediat indsættelse eller ej?

Nej. I nogle tilfælde er det muligt at se det efter røntgenundersøgelsen og den planlægning, som tandlægen har foretaget. Det er dog først, når implantatet er blevet placeret at din tandlæge vil kunne give dig et endeligt svar.

I de tilfælde, hvor protetikken ikke indsættes samme dag, hvad anvender patienten så?

Tandlægen giver dig en midlertidig protese, du kan anvende. I nogle situationer, f.eks. i forbindelse med aftagelige proteser, kan patienten få et blødt materiale indvendigt i protesen, som skal udskiftes regelmæssigt, mens patienten venter på sin endelige protese.

Hvor meget koster det at få et implantat?

Flere faktorer har betydning for prisen på implantatbehandling, f.eks. antallet af tænder, der skal erstattes, og antallet af tandimplantater, der skal placeres. Der kan også være behov for yderligere indgreb, før implantatet placeres (f.eks. transplantationer osv.) for at sikre, at proceduren er holdbar. Dette har også en indvirkning på prisen. Bed din tandlæge om et prisoverslag.

Hvem kan foretage tandimplantatbehandlinger?

Det er op til tandlægen at træffe beslutning om en passende behandling efter en omhyggelig vurdering. Tandlægen vil afgøre, om proceduren for at placere et implantat udgør en risiko for dit helbred og om der er faktorer, der kan påvirke helingsevnen af knoglen eller de bløde væv, der er involveret i indgrebet.

Er der nogen, der er uegnede til tandimplantater?

Patienter med medicinske begrænsninger eller andre begrænsninger, der kan påvirke helingsprocessen i knogler eller blødt væv (f.eks. bindevævslidelser, behandlinger med visse lægemidler, generelle systemiske sygdomme, rygning). Sådanne patienter bør konsultere deres tandlæge og sammen skal de nøje vurdere de mulige risici og fordele ved benyttelsen af tandimplantater.



Vil de nye tænder se kunstige ud?


Hvis din tandlæge bruger implantater og moderne kosmetiske dentalteknikker, som påvirker udseende, komfort og funktion, vil behandlingen formentlig overgå dine forventninger. Alligevel afhænger prognosen for behandlingen af flere faktorer, herunder hvor lang tid der er gået siden du mistede din tænder. Jo før du begynder behandlingen, jo bedre er dine chancer for en vellykket genopbygning med implantater.

Vil jeg kunne tygge med samme kraft og på samme måde som med mine naturlige tænder?

Ja. Din evne til at tygge vil blive betydeligt forbedret efter tilpasningsperioden.

Hvilken type pleje er påkrævet for at passe på tandimplantaterne?

I første omgang skal du planlægge en række regelmæssige besøg hos din tandlæge. Ligesom med naturlige tænder, er det desuden vigtigt at børste, bruge tandtråd og mundskyl for at sikre en god mundhygiejne.

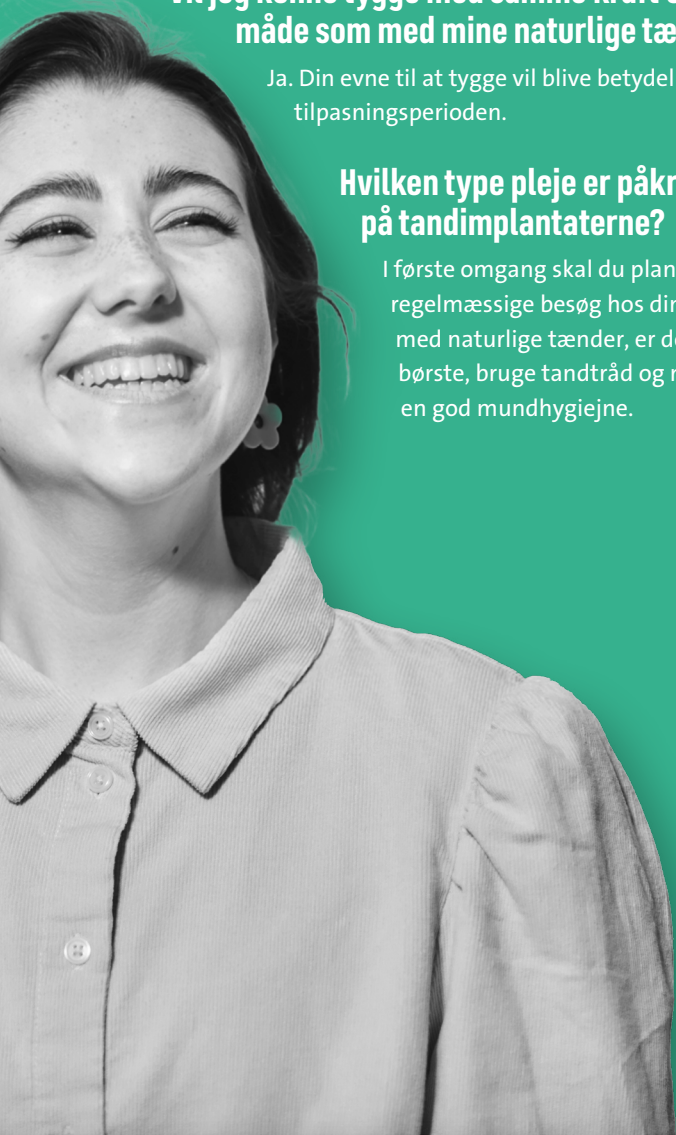

VELKOMMEN TIL STRAUMANN

Uanset hvor i livet du befinder dig, kan du og dine Straumann-tandimplantater få behandling i nærheden.

Se **www.straumann.dk** og læs "Til patienter" for at få flere oplysninger om alle produkter og løsninger fra Straumann. Alle oplysninger fås på dit lokale sprog.

Scan QR-koden

og kom direkte ind på det lokale Straumann-patientwebsted



Straumann Danmark ApS

Nygårds Plads 21, 1.

DK-2605 Brøndby

Tel: +45 4616 0666

E-mail: info.dk@straumann.com

www.straumann.dk

© Institut Straumann AG, 2023. Alle rettigheder forbeholdes.

Straumann® og/eller andre varemærker og logoer fra Straumann® n
ævnst heri er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører
Straumann Holding AG og/eller virksomhedens søsterselskaber.

